

MASCHERINA PROTETTIVA ANTI-DROPLET PLURIUSO 001- CON ELASTICO DIETRO LE ORECCHIE /002- CON ELASTICI DIETRO LA NUCA SOLO SU RICHIESTA)/ 003- BABY / 004- JUNIOR



IMBALLO



FRONTE

RETRO



PROFILO

ARTICOLO: MASCHERINA /001-002-003-004

MISURA: 19 X 11 CM ADULTO UNISEX - BAMBINO: TG I(ANNI 2-6) 12,5 X 7,5 TG II (ANNI 6-12) 13,5 X 8,5

MATERIALE: 97% COTONE 3%EA 2 STRATI- 3 FONDE- COL BIANCO IN RISPETTO DELLE NORME REACH

TIPO DI FINISSAGGIO: FLUOROCARBONICA IDROREPELENTE

LAVAGGIO: 

CARATTERISTICHE MATERIALE: IDROREPELENTE – SANIFICATO - ANTIBATTERICO

ELASTICO: BIANCO 5/6 MM , POLIAMMIDE 50%- ELASTOMERO 50% - LATEX FREE

FILO CUCITURA: POLIESTERE 100%

TAGLIA: UNICA X ADULTO- DUE TAGLIE BIMBO

USO: DISPOSITIVO MONOPAZIENTE PER PROTEZIONE VOLTO- IDROREPELENTE FILTRANTE- LAVABILE TIPO I

Mascherina lavabile per la protezione da schizzi e goccioline. Adatta per la protezione da schizzi e goccioline che potrebbero contenere particelle di polvere, virus o batteri. E' una mascherina di tipo chirurgico ed è pensata per l'uso individuale, può essere usata in tutti gli ambienti per proteggere noi stessi e gli altri da possibili infezioni che si trasmettono mediante goccioline emesse durante la respirazione. Lavarsi le mani ogni volta prima di togliere la mascherina e dopo averla rimossa.

LAVABILE SEGUENDO LE DIRETTIVE SOTTO:

DISINFETTARE LA MASCHERINA PRIMA DELL'UTILIZZO E DOPO OGNI GIORNATA

Diluire 20ml di candeggina (pari a 3 cucchiaini da tavola) o Napisan o amuchina in un litro d'acqua lasciare la mascherina in ammollo per 15 minuti, non sfregare, quindi sciacquare abbondantemente.

Si consiglia di cambiarla dopo 20 lavaggi.

SCADENZA: 03/2023

Conservazione

Prima di conservare il dispositivo medico verificare che sia pulito.

- Conservare il dispositivo medico in ambienti interni freschi, lontano da agenti atmosferici e getti di vapore.
- Conservare il dispositivo medico lontano da fonti di calore, fiamme libere e dal diretto irraggiamento del sole.
- Dopo l'utilizzo, riporre la mascherina lavata e completamente asciugata all'interno di un contenitore, al riparo dalla luce solare diretta, da agenti atmosferici, fonti di calore, dalla polvere, liquidi ed umidità.

Smaltimento

Al termine dell'utilizzo del dispositivo medico procedere con il suo smaltimento.

I materiali di costruzione dei dispositivi medici non richiedono particolari procedure di smaltimento. È necessario fare riferimento alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti in indifferenziati.

Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto all'ambiente.

IMBALLO: SINGOLO X OGNI DISPOSITIVO ACCOMPAGNATO DA ISTRUZIONI



PRODUZIONE: MADE IN ITALY TAKISTON s.r.l. **DISTRIBUITO DA:** SERIDE s.r.l.



Fabbricante: Takiston S.r.l.

Sede: Via Provinciale Sud, 23 – 40050 – Castello D' Argile (BO)

Dispositivo: Mascherina lavabile

Modello e cod.: Mascherina 001

LOT

Lotto numero: LTKS921420



Data fabbricazione: 04/2020

Dispositivo medico di classe I

Tipo I

Le corrette modalità di utilizzo e tutti i restanti dati tecnici sono indicati nel manuale d'uso e di manutenzione. Mascherina per evitare contaminazioni da e verso il paziente e proteggere le vie respiratorie da polvere, spray ed altro materiale che viene utilizzato durante un'attività medica. Conservare il dispositivo medico lontano da fonti di calore, fiamme libere, irraggiamento solare diretto e da agenti atmosferici. Conservare il dispositivo in un ambiente fresco.

CE



Composizione: 97% cotone, 3% elasthan

Made in Italy

Marcatu**CE**.net
Aut. N° 11/2020-04/04/2020 del 04/04/2020